

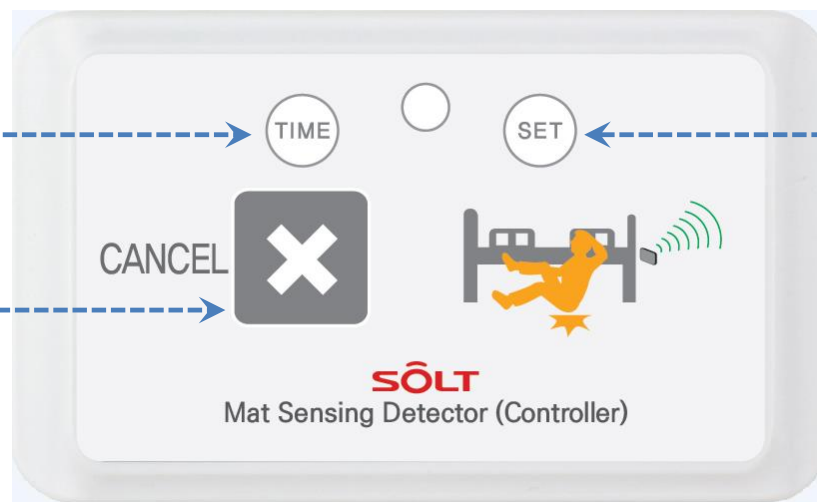
## マット感知器の使用説明書(STS-100FM)

## 機能

1. ステップセンシング / アラーム
2. 圧力開放センシング / アラーム

アラーム時間  
設定

キャンセルボタン

センシング方式の選択;  
ステップ  
または  
圧力開放

マット感知器(コントローラーとベルパーツ)

※ ベルはコントローラー内部に磁石が内蔵されており、ベッドの脚のような鉄で作られたところに装着できま

# マット感知器の使用説明書(STS-100FM)

## 1. 機能の選択(デフォルト機能 :ステップセンシング )

- 1) "SET"ボタンを3秒間押すたびにLEDが次のように点滅し、機能に変更される;
  - LEDが1回点滅したら→ステップセンシング機能(マットを踏むとアラーム信号が送信される.)
  - LEDが2回点滅したら→圧力開放センシング機能(マットが圧力から解放されると,設定時間後に送信されるアラーム信号。)

## 2. アラーム時間設定(圧力開放感知機能)

- 1) 設定のためにコントローラ(ベル)をマットから分離します。
- 2) "Time"ボタンを3秒ジョアン押しすたびにLEDが次のように点滅し、アラーム時間が変更されます。
  - LEDが1回点滅したら→ 0秒 (圧力が除去されるやいなや信号を送る。)
  - LEDが2回点滅したら→ 1秒 (圧力が除去された後、1秒後に信号を送る。)
  - LEDが3回点滅したら→ 3秒 (圧力が除去された後、3秒後に信号を送る。)
  - LEDが4回点滅したら→ 5秒 (圧力が除去された後、5秒後に信号を送る。)

# マット感知器の使用説明書(STS-100FM)

## 3. 使用時注意事項

- 1) 水がマットに浸入しないようにしてください。
- 2) 折り目以外はマットを畳まないでください。感知ラインが切断される可能性があります。
- 3) 使用しない場合、マットとコントローラを分離して保管してください。そしてマットの上に重い物を載せておかないでください。特に車椅子がマットを踏まないように注意してください。

## 4. イメージとサイズの一一致



マット検知センサー(センサー/マットパーツ)